

歯科医院・技工所専用

期間2018年11月7日～12月20日

新発売!

デントクリーン 4L 新発売 & ダブルパックキャンペーン




大容量
4Lサイズ

標準価格
4L 11,900円 (税別)


注ぎやすい
サーバータイプ。

①黒い点線で囲った部分を切り取ります。
②本体のキャップを付属コックと交換し、本体をこの外箱に戻します。
③ご使用後は、コックが閉じているのを確認した上で、外箱のこの面が上になるように保管してください。

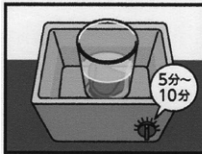

超音波洗淨 漂白

デントクリーン
1. 2L アルカリ性
(2倍に希釈して使用)
5～10分の超音波洗淨で、
義歯の頑固な着色がとれる。

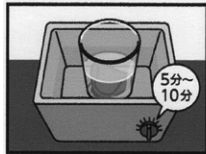

超音波洗淨 歯石除去

ストーンメルト
1. 8L 酸性
5～10分の超音波洗淨で、
義歯に付着した歯石がとれる。

【キャンペーン種類】

- デントクリーン 4L ⇒
- デントクリーン ダブルパック = ~~8,600円 (4,300円 × 2)~~ ⇒
- ストーンメルト ダブルパック = ~~7,800円 (3,900円 × 2)~~ ⇒

【ご注文数】

- 11,900円 × ___ 個
- 7,700円 × ___ セット
- 7,000円 × ___ セット (税別)

※デントクリーンはpH約12の強アルカリ性のため一部の樹脂には使用できませんので、樹脂製造元にご確認下さい。
デントクリーンとストーンメルトを混合すると、有毒な塩素ガスが発生して危険なため絶対に混合しないで下さい。

● 歯科医院名	● お取引歯科商店名
● ご住所 〒	担当者名 ()
	TEL

亀水化学工業株式会社
http://kamemizu.co.jp

お問合せ先 0120-267-720
mail: info@kamemizu.co.jp

FAX 072-826-1299