

“ストーンメルト” Q & A

歯石用

Q 1 : 安全性に関しては？

A : 皮膚等に付着した場合、軽い場合はヒリヒリ感や赤くなる等の症状があり、放置した場合にはやけどのような症状になります。

本剤が付着した場合の対処方法は、すぐに流水で洗い流してください。また、放置して症状が悪化した場合には医師にかかってください。

万一、飲み込んだ場合、応急処置として多量の水または牛乳を飲ませ、医師にかかってください。

Q 2 : 除菌作用はありますか？

A : 手洗い洗剤用の殺菌剤や医療器具用の殺菌剤として使われている成分が含まれており除菌作用があります。

Q 3 : 義歯臭はとれますか？

A : ある程度の汚れや臭いは除去できますが、弊社の『デントクリーン』と比較すると、汚れの落ち方や除菌効果は劣っています。

Q 4 : 歯科材料に与える影響は？

A : 塩素系の製品(例：『デントクリーン』など)よりも本剤は金属を腐食しますが、超音波洗浄器で30分程度の短時間の浸漬では、殆どの歯科材料は劣化いたしません。

なお、全ての製品を試験したものではありませんので、保証するものではありません。

Q 5 : 有害な塩素ガス発生とは？

A : 弊社の『デントクリーン』などの塩素系の製品と本剤を混合すると、有害な塩素ガスが発生して大変危険なため、絶対に混合しないようにしてください。

Q 6 : 有効期間は？

A : 雑品ですので特に有効期限表示などの決まりはありませんが、商品の劣化は歯石が取れづらいなどで判断できます。蓋を開けたまま放置したり、極端な高温多湿などよほど過酷な環境に置かない限り、有効期限を意識する必要はありません。

Q 7 : 廃棄方法は？

A : そのまま大量の水道の流水下で廃棄してください。