

歯石用

酸性

STONE MELT GEL

ストーンメルトジェル

歯科医院/技工所専用義歯洗浄剤

義歯に付着した 歯石の除去に!!

- 「義歯の歯石」または「歯ブラシ」に塗布して**1~2分磨くだけ**
- ヌメリをとり、**除菌**にもなります
- クラスプやレジン床を**傷めません**
- 超音波洗浄器不要**

●容 量:200mL ●標準価格:2,480円(税別)

訪問診療 や **介護施設**

などで **簡単洗浄!!**



【使用前】



【1分後】



【使用后】

STONE MELT GEL

ストーンメルトジェル

歯科医院/技工所専用義歯洗浄剤


用途:義歯に付着した歯石の除去
成分:リン酸、増粘剤、界面活性剤、
その他
液性:酸性
容量:200mL

特長


- 義歯に付着した歯石を除去し、汚れを落とします。
- アクリル系軟質、シリコーン弾性リライニング材にも使用できます。
- 強酸性で磨くことで、除菌効果があります。
- 短時間の使用のため、金属床やクラスプにも使用できます。

使用方法


※取扱いには必ず保護手袋、保護眼鏡を着用してください。

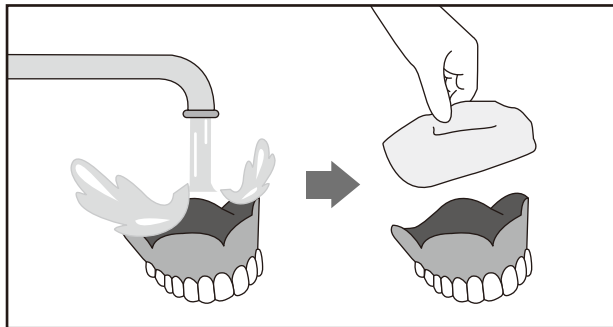


1. 義歯を水で軽く洗って水分をふきとります。

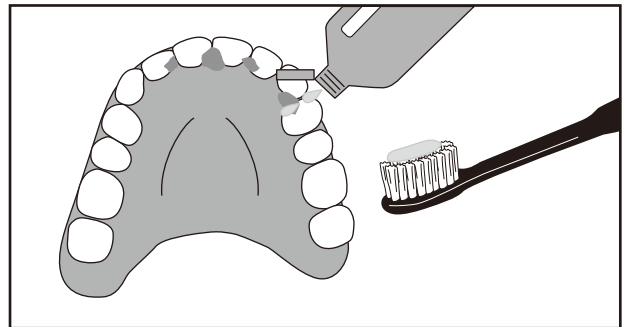

2. 歯石付着の部分または歯ブラシに塗付します。
時間をおく必要はありません。

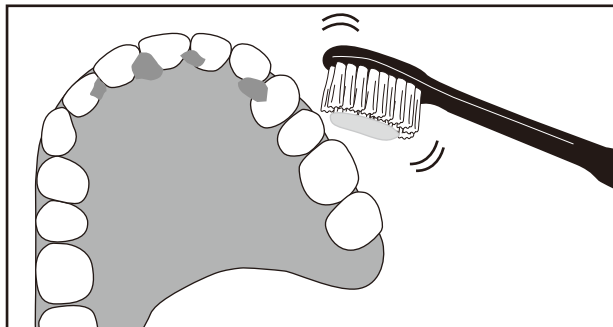

3. 義歯用歯ブラシ、または使い捨て歯ブラシを用いて1~2分磨いてください。

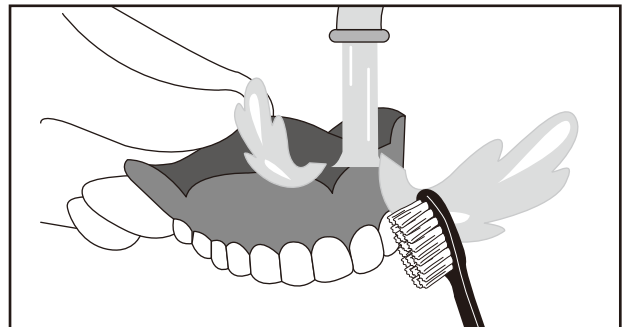

4. 磨いた後は必ず、十分な流水でしっかりとよくすすいでください。

歯石の量が多い場合は、一度に除去しようとせず数日間に分けてご使用ください。

(ご注意) 塩素系の製品と混合すると、有害なガスが発生して危険なため絶対に混合しないこと。

超音波洗浄器をお使いの場合は



着色
汚れに

デントクリーン

- 容量:1.2L
- 標準価格:4,300円
(税別)



頑固な
歯石に

ストーンメルト

- 容量:1.8L
- 標準価格:3,900円
(税別)

●取扱歯科商店名

発売元 亀水化学工業株式会社 禁無断転載
〒572-0071大阪府寝屋川市豊里町17-16
お問い合わせ フリーダイヤル ☎0120-267-720