

Comfortner

Light Cured Denture Soft Relining Material

承認番号 21600BZZ00150000

光重合型アクリル系軟質リライニング材

コンフォートナー
PAT.P

- 床からの剥離が少ない。
- 口腔内で追加、修理ができる。
- ティッシュコン並みの軟らかさ。
- “酵素入りポリデント” が使える。
- 粘膜に似た粘弾性で、より生理的。
- シリコン系よりも咀嚼効率が高い。

ティッシュコン並みの超軟質アクリル系リライニング材の欠点として、市販の義歯洗浄剤による材質の劣化があげられます。

そのため義歯の洗浄ができず面が荒れ、耐久性に今まで問題がありました。



粉/60g 液/50mL コートライナー/20mL その他 病院価格16,800円

“コンフォートナー”は、“酵素入りポリデント”が
使え、耐久性が飛躍的に向上!

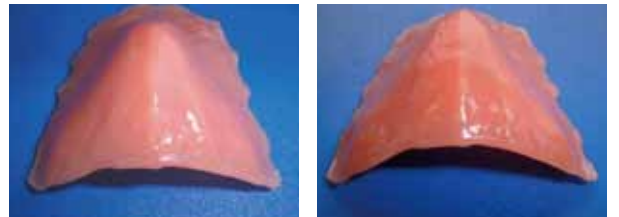


写真1 術前の口蓋床

写真2 6ヶ月後の口蓋床

—義歯洗浄剤“酵素入りポリデント”で毎日洗浄した例—

[留意点]

1. 本材のご使用にあたっては、汎用のラボ用光重合器が必要で、充填用光重合器の使用は不可です。
2. “酵素入りポリデント”（アース製薬）以外のポリデントや、他社製の義歯洗浄剤の使用は不可です。
3. 本材は装着初期に比べて、経時的にやや硬化いたします。

KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD.

Comfortner

Light Cured Denture Soft Relining Material

光重合型アクリル系軟質リライニング材 コンフォートナー PAT.P

“コンフォートナー”は、ティッシュコン並みの柔らかさを有する直接法用の光重合型アクリル系軟質リライニング材として、下記の特長を有します。

さらに、光重合型の接着・表面滑沢材“コートライナー”PAT.Pとの併用で、アクリル系では従来使用ができなかった義歯洗浄剤“酵素入りポリドント”が使用できるようになり、毎日洗浄することによって口腔内での耐久性が大幅に向上するようになりました。

[アクリル系軟質の特長]

- ① 直接、口腔内で追加修正ができる。
- ② シリコン系よりも咀嚼効率が低い。
- ③ 同じアクリル系のため、床からの剥離が少ない。
- ④ 弾性が粘膜の性状に近い粘弾性で、より生理的。

[適応症]

- 顎骨に吸収があり、粘膜が菲薄で疼痛のある症例。
- 顎堤に深いアンダーカットのある症例。

[コンフォートナー梱包箱]

コンフォートナー 承認番号:21600BZZ00150000
粉60g、液50mL、その他
コートライナー 承認番号:21600BZZ00149000
20mL、その他

《義歯洗浄剤に関するご注意》

- 市販の一般義歯洗浄剤の中でも、“酵素入りポリドント”（アース製薬）以外の商品は絶対に使用しないようにしてください。同じポリドントでも、“スモーカーズポリドント”や“部分入れ歯用ポリドント”、また、他社の義歯洗浄剤は本材のリライニング面を劣化させますので、絶対に使用しないようにご指導ください。（写真2参照）
- 弊社の軟質レジン専用義歯洗浄剤“クリーンソフト”も使用することができますが、漂白効果はありませんのでご注意ください。

《アクリル系軟質リライニング材の面荒れ2大原因》



写真1
水洗のみによる表面の石灰化
（3ヶ月後）



写真2
不適当な市販義歯洗浄剤による
表面への気泡発生

[使い方]



写真1 床粘膜面の削除



写真2 接着材
“コートライナー”の塗布



写真3 口腔内への挿入



写真4 表面滑沢材
“コートライナー”の塗布



写真5 “オキシバリアー”の
塗布

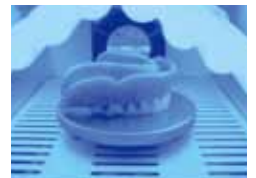


写真6 光重合

関連商品

Coatliner
Light Cured Smoothing Agent

光重合型アクリル系
軟質リライニング材用接着・表面滑沢材
コートライナー
承認番号 21600BZZ00149000



本材は光重合型のため滑沢、且、強固な膜で軟質リライニング面を保護し、面荒れを予防します。（PAT.P）

[セット内容]（表面商品写真参照）
オキシバリアー用ブラシ…15本
コートライナー…20ml
オキシバリアー小分け用カップ
筆洗い液…10ml
オキシバリアー用スポイト（中）
オキシバリアー…25ml
筆洗い用スポイト（小）

亀水化学工業株式会社

大阪府寝屋川市豊里町17-16 〒572-0071
TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299

（お問合せ）フリーダイヤル0120-267-720