

パッケージ				
商品名	デントクリーン		ストーンメルト	ストーンメルトジェル
容量	1.2L	4.0L	1.8L	200mL
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「デントクリーン」に酸性の製品を混合したり、「ストーンメルト」「ストーンメルトジェル」に塩素系の製品を混合すると、有害な塩素ガスが発生し大変危険なため絶対に混合しないこと。</li> <li>●超音波洗浄器に本剤を直接入れて使用しないこと。</li> <li>●本剤は医療従事者専用で、それ以外の者が触れないように保管・管理すること。</li> <li>●取り扱いには必ず保護手袋、保護眼鏡を着用すること。</li> <li>●目に入った場合は直ぐに多量の水で洗い流したあと、眼科を受診すること。</li> <li>●万一、皮膚に付着した場合はヌメリがとれるまで流水で洗い流すこと。</li> <li>●長時間補綴物を本剤に浸漬したままにしないこと。義歯が脱色したり、金属が変質することがあります。</li> <li>●他の製品と混ぜたり、飲み込んだり、本来の用途以外に使用しないこと。</li> <li>●衣服のシミになることがあるので、衣服につかないようにすること。</li> <li>●廃液は多量の水で薄めながら廃棄してください。</li> <li>●冷暗所に立てて保管すること。</li> </ul>			

用途	デンチャープラーク染色剤	軟質裏装材専用義歯洗浄剤
パッケージ		
商品名	デンチャープラークチェッカー	クリーンソフト
容量	300mL	90g (約3ヶ月分)
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●義歯修理または裏装の移行部の隙間や歯石の染色は取り除きにくいことがあります。</li> <li>●本剤を口の中で使用しないでください。</li> <li>●歯石、深いクラックや染色義歯の清掃に使用した歯ブラシ植毛部の染色は取り除きにくいことがあります。(水洗い等により1週間程度で染色が目立たなくなります。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●材質が劣化するため、クリーンソフトには漂白剤は入っておりません。そのため常用薬や嗜好品などからの色素沈着により、まれに義歯が黒ずんでくる場合があります。この場合には短時間に限って、一時的に市販の義歯洗浄剤で着色義歯を漂白してください。</li> </ul>

2ステップで シンプル＆クリーン!  
 ～見違えるほどキレイな義歯に～

〈義歯洗浄剤シリーズ〉  
 亀水化学工業株式会社



〈発売元〉  
**亀水化学工業株式会社**  
 〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町17-16  
 お問い合わせ ☎ 0120-267-720  
 ホームページ <http://kamemizu.co.jp>



大阪の元家「ものづくり企業」

KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD.

# 2つのステップで義歯ケア「指導」&「洗浄」

## 歯科医院における義歯洗浄

1. 2ヶ月に1回程度、下記の手順で行う。
2. 歯科訪問診療などで十分な義歯管理が困難な患者様の場合には月に1回の洗浄を行う。

### ■ 義歯洗浄の手順

- ① 義歯管理状況を確認
- ② 染色液を使用し、プラークの除去状態を見せて機械的清掃だけでは不十分なことを説明
- ③ 義歯の洗浄
- ④ 義歯の適合、咬合、維持などを診察



「診療室における義歯の洗浄と歯科衛生士による義歯管理指導の指針（2013年度版）」日本老年歯科学会 ガイドライン 参考

## Step 1 指導



### デンチャープラークチェッカー

患者様への義歯洗浄方法の指導用に

- デンチャープラークや破折の発見が容易。
- きめの細かい泡で義歯全体に広げやすい。
- 泡状で垂れにくいので、周囲を汚しにくい。
- 義歯の洗浄効果もある。

従来の  
歯垢染出液

- ・ 価格が高い
- ・ 作業が手間
- ・ 後始末が大変

デンチャー  
プラーク  
チェッカー

¥ 低コスト

スプレーするだけ

流し台など、義歯以外には着色しない

【使用法】



① 泡出し口に義歯を近づけ、1~2プッシュして、ゴム手袋をした手指、またはスポンジブラシで義歯全体に塗り広げます。

② 10秒ほど経ってから、軽く水で洗い流してください。デンチャープラークの付着箇所や、義歯の破折が判ります。



### クリーンソフト

軟質裏装材専用義歯洗浄剤


ティッシュコンディショナーや軟質リライン材の劣化防止に！

日常のお手入れに



● 使用方法  
入れ歯に付着したものを歯ブラシ等を用いて流水で取り除いてください。

コップ一杯（約150mL）の水または湯（15℃から40℃程度）に、容器をひと振りして本剤1回分（約1g）を加え、よくかき混ぜてください。

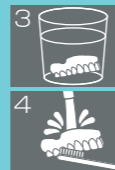

入れ歯を2時間以上浸けてください。

洗浄後は、流水でよくすすいでください。

## Step 2

### 義歯の洗浄

#### デントクリーン

わずか5~10分の超音波洗浄で、義歯の着色がとれる



超音波  
洗浄 漂白

#### ストーンメルト

わずか5~10分の超音波洗浄で、義歯の歯石がとれる



超音波  
洗浄 歯石  
除去



- わずか5~10分の超音波洗浄で、歯石がとれる。
- 又メリをとり、除菌にもなる。
- クラスプやレジン床を傷めない。



- わずか5~10分の超音波洗浄で、義歯の着色がとれる。
- 軟質リライン材にも使える。
- 除菌もできる。
- 義歯臭がとれる。



- ① 黒い点線で囲った部分を切り取ります。
- ② 本体のキャップを付属コックと交換し、本体をこの外箱に戻します。
- ③ ご使用後は、コックが閉じているのを確認した上で、外箱のこの面が上になるように保管してください。

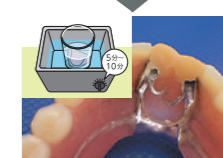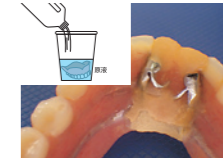

【使用法】

1. 補綴物表面をブラシで清掃し、フタ付きのガラス容器またはポリエチレン容器に入れます。
2. 本剤を指定の濃度で補綴物全体が浸かるまで容器に入れます。  
・デントクリーン/本剤1:水1  
・ストーンメルト/原液
3. 容器ごと超音波洗浄器に5~10分程度かけます。  
※補綴物を本剤に30分以上浸漬しないでください。  
義歯が着色したり、金属が変質することがあります。
4. 洗浄後、義歯に着色または歯石が残っている場合は、ブラシでこすり落としてください。  
※汚れが残っている場合は、洗浄時間を延長してください。  
※ピンセットまたは保護手袋で取り出し、保護眼鏡を着用してください。
5. 洗浄液を水で充分うすめて洗い、補綴物は容器のまま水で数回よくすすぎます。
6. 新しい水を入れて5分程度超音波洗浄します。  
※患者様にわたす前に十分に水洗してください。

#### ストーンメルトジェル

使い捨て歯ブラシに塗布して1~2分磨くだけで歯石が除去できます。

超音波  
不要 歯石  
除去

- 「義歯の歯石」または「使い捨て歯ブラシ」に塗布して1~2分磨くだけ。
- 又メリをとり、除菌にもなる。
- クラスプやレジン床を傷めない。
- 超音波洗浄器不要。



【使用法】

1. 義歯を水で軽く洗って水分をふきとります。
2. 歯石付着の部分または使い捨て歯ブラシに塗布します。時間を必要はありません。
3. 義歯用歯ブラシまたは使い捨て歯ブラシを用いて1~2分磨いてください。
4. 磨いた後は必ず、十分な流水でしっかりとよくすすいでください。