

# 義歯安定剤の使用を減らし

より適合した義歯をつくるために  
訪問歯科医師が長年にわたり開発

汚れに強い

形態修正  
しやすい

義歯洗浄剤  
使用可能

DENTURE SOFT  
EX

TISSUE TREATMENT  
AND FUNCTIONAL IMPRESSION  
1-1 SET

KAMEMIZU

NEW  
タイプ

進化した  
ティッシュコンディショナー

やわらかさをキープ  
(患者満足度が高い)

デンチャーソフト EX  
DENTURE SOFT  
EX



色調 ピンク / ホワイト

認証番号 304ADBZX00109000  
義歯床用短期弾性裏装材 (管理医療機器)




亀水化学工業株式会社  
〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町 17-16  
TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299

お問い合わせ ☎ 0120-267-720  
<https://kamemizu.co.jp>  
E-mail: info@kamemizu.co.jp

# やわらかい

義歯床下粘膜の負担を軽減します。

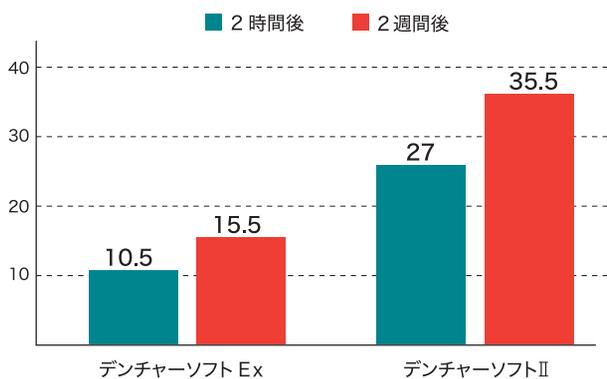

デンチャーソフト Ex・デンチャーソフト II 硬さ比較

※デュロメータータイプ E (ゴム硬度計) で測定した値 (37℃浸漬、JIS T6519 準拠)

# 汚れにくい

市販義歯洗浄剤

“酵素入りポリデント”

(発売元：アース製薬株式会社)

が使用できます。

注 1) 裏装直後から 1 週間までは 5 分以上浸漬しないでください。

注 2) “酵素入りポリデント” (アース製薬) 以外のポリデントや、他社製の市販義歯洗浄剤は使用しないでください。



# 操作がしやすい

- 粉液のなじみが良く、混和がスムーズ
- カーバイドバーやビッグシリコンポイントが使用可能 (※約 1 週間後から)



## 包装

## デンチャーソフト Ex セット

内容

粉 110g、液 100mL  
粉計量カップ、混和カップ、  
スポイト、スパチュラ

色調

ピンク・ホワイト



## 関連商品

接着材兼表面滑沢材

## ニュートップコート

アクリル系軟質リライン材専用で床との接着材として使用します。

(注) 表面滑沢材として“ニュートップコート”を義歯床粘膜面に使用した場合は義歯洗浄剤を使用しないでください。



Check

パシャルデンチャー症例や辺縁部など厚みが薄くなる症例に接着剤としての使用を推奨します。

デンチャーソフト Ex

# DENTURE SOFT EX


## 使用方法

### 1 割合




裏装する義歯の床粘膜面を必要に応じてバーなどで割合して新生面を出し、清掃・乾燥します。

### 2 計量

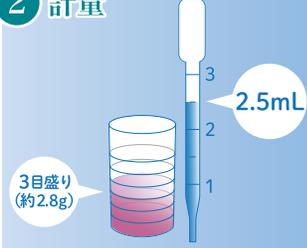

粉と液を計量します。標準粉液比は付属の粉計量カップ3目盛り (約2.8g) に対して液2.5mLです。上顎総義歯の場合はそれぞれの量を倍にしてください。

### 3 混和

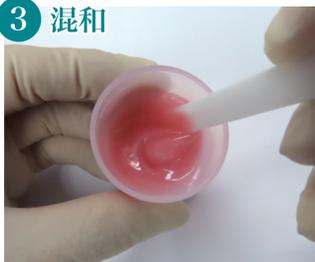

計量した粉と液を空気をまきこまないよう約20秒間混和します。混和後1~2分で水あめ状になります。

### 4 装着



水あめ状になった本材を義歯床粘膜面に盛り上げます。スパチュラ等で均等厚にして、口腔内に装着します。(口腔内保持時間：約5~6分)

### 5 トリミング



はみ出した余分の本材をハサミやナイフなどを用いて除去します。

### 6 完成



色調は2色あります。(ピンク・ホワイト)

低温環境で、液が分離や白濁することがあります。よく攪拌し、暖かい場所に置くと元の透明な液状に戻ります。透明に戻ってからお使いください。品質に変わりはありません。

※ご使用の前に必ず添付文書をよく読んでください。