

ニュートップコート



表面滑沢材兼接着材
(軟質リライン材用)

NEW Top Coat

ティッシュコンディショナーに塗るだけで耐久性が向上

1. 裏装面の面荒れ防止

「ニュートップコート」でしっかりガード

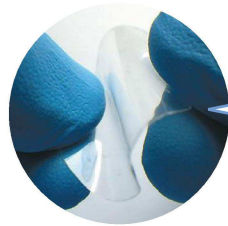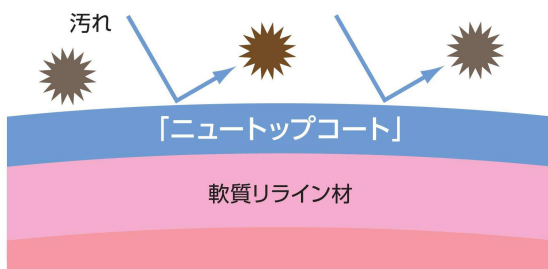


ニュートップコートは
薄い軟らかい膜を形成し、水分をはじきます

最初は、においと刺激がありますが、しっかりエアー乾燥した後に、流水下で約1分すぐことで軽減されます。

2. デンチャープラーク付着を防止

きれいな面

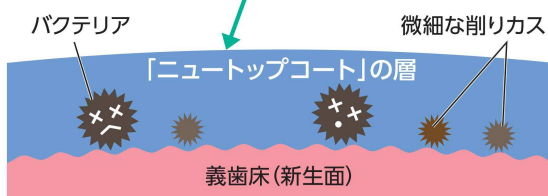

接着阻害因子 (旧義歯の前処置で新生面に残る微細な削りカス、バクテリア) の増殖を防止。



左側 トップコート塗布し、カンジダ菌培養
右側 カンジダ菌塗布

Point ニュートップコートは義歯床表面の溶解を行い、裏装材との接着を補助します。

使用にあわせて二つのタイプ

■ ディスポタイプ … 付属の容器に小分けし使用



■ ノーマルタイプ … 付属のブラシを取り替えて使用



規格	内容
ニュートップコート 80mL	本材80mL、ブラシ40本、小分け容器40個、筆洗いうすめ液10mL、スポイト
ニュートップコート 30mL	本材30mL、ブラシ12本、筆洗いうすめ液10mL、スポイト
ニュートップコート 6mL	本材6mL、ブラシ12本
取替用ブラシ 50本入	ブラシ50本
筆洗いうすめ液 10mL	筆洗いうすめ液10mL、スポイト

<使用上の注意>

揮発性の高い製品となっており、品質保持のため開封後、冷蔵保存を推奨しております。粘性が増して塗りにくくなったとき、「筆洗いうすめ液」を少量ずつ加えて塗りやすい状態でご使用ください。

管理医療機器
歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材
承認番号 2100BZZ00591000

亀水化学工業株式会社

〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町17-16 ☎072-826-7720 (代)

(R4.5)

お問い合わせ
ホームページ

0120-267-720
<http://kamemizu.co.jp/>