



KAMEMIZU

DENTAL PRODUCTS
CATALOGUE

機能回復、健康保持、美の追求

KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD.




義歯安定剤の使用を減らし

より適合した義歯をつくるために
訪問歯科医師が長年にわたり開発

汚れに強い

形態修正
しやすい

義歯洗剤
使用可能

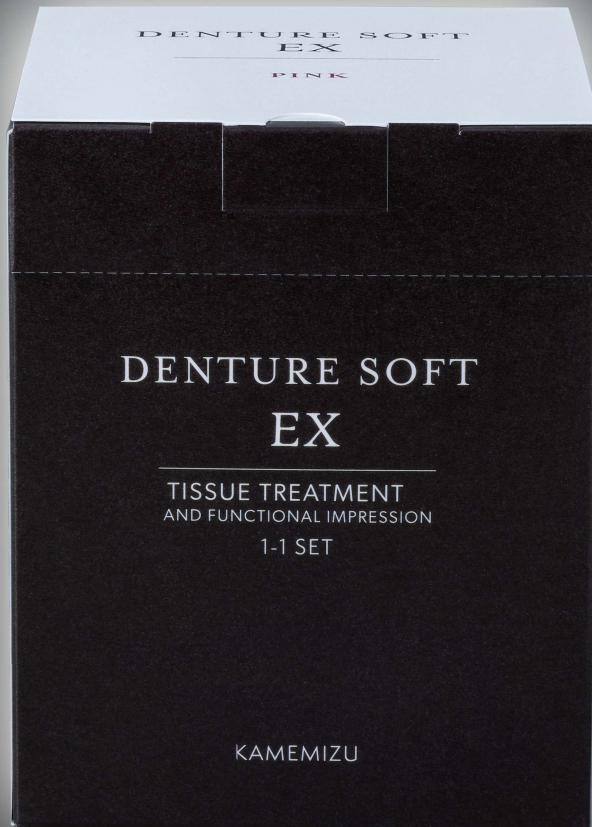

やわらかさをキープ
(患者満足度が高い)

NEW
タイプ

進化した
ティッシュコンディショナー

デンチャーソフトEX
DENTURE SOFT
EX



色調/ピンク・ホワイト

セット内容: 粉 110g、液 100mL、粉計量カップ、混和カップ、スポイト、スパチュラ 病院価格: 18,000 円(税別)

認証番号 304ADBZX00109000
義歯床用短期強性裏装材(管理医療機器)



亀水化学工業株式会社

〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町 17-16
TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299

お問い合わせ ☎ 0120-267-720

<https://kamemizu.co.jp>

E-mail: info@kamemizu.co.jp

進化したレプリカシリーズ
歯科印象トレー用レジン
レプリカトレー

活用した個人トレー

— 研磨面の形態が再現できます —

石膏模型の作成不要!!


患者さんから印象を採る必要がありません



レジン臭軽減(当社比)



色調:ピンク アイボリー クリア

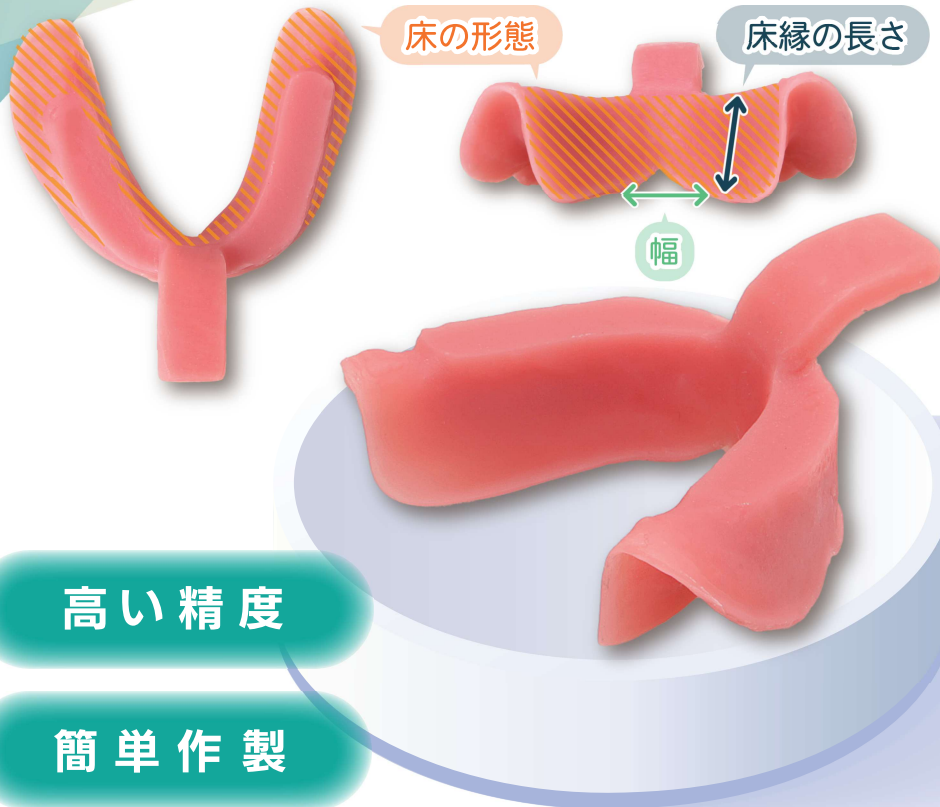

高い精度

簡単作製

あつたらいいな
個人トレーの簡単・な作り方

POINT

旧総義歯を活用した作製方法

個人トレーの作製方法

- STEP 01 旧義歯の印象
- STEP 02 埋没
- STEP 03 レジン混和・流し込み
- STEP 04 持ち手作製・取付

色調:ピンク・アイボリー・クリア

病院価格:専用粉 250g /9,000円(税別) 専用液 200mL /5,000円(税別)

歯科印象トレー用レジン
(一般医療機器)
届出番号:27B2X00004000002



亀水化学工業株式会社

〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町 17-16
TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299

お問い合わせ ☎ 0120-267-720

<https://kamemizu.co.jp>

E-mail:info@kamemizu.co.jp

DENTAL PRODUCTS CATALOGUE

KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD.

KAMEMIZU CHEM

ライン	
軟質⇒硬質	
ペリフィット	2
DIL	2
Fdrペリ	2
FDr	2
ダイナミックライナー	3
ティッシュコンディショナー	
デンチャーソフトⅡ	3
硬質	
マイルド	3
デンチャーライナー	3
軟質	
FDソフト	4
コンフォートナー	4
ティッシュテNDER	4
ソフテン	4
表面滑沢材 兼 接着材	
コートライナー	5
ニュートップコート	5
義歯関連	
治療用義歯	
レプリカ	5
仮床・トレー用レジン	
フィットベース	5
咬合面再構築用レジン	
バイトアップ	6
歯冠材料	
仮封用レジン	
ポリシール	6
テック用レジン	
テックレジン	6
鑄造可能即重レジン	
レジナップ	6
即重レジン	
汎用レジン	
スナップ	7
スキップ	7
咬合採得	
バイトレジン	7
バイトプレート用レジン	
マルチガード	7
診療用器具	
簡易集塵BOX	
ダストシューター	8
カンジダ培地	
カンジダディテクター	8

義歯の洗浄	
着色用	
デントクリーン	9
歯石用	
ストーンメルト	9
ストーンメルトジェル	9
ホームケア	
クリーンソフト	9

DENT-CARE®

口臭対策	
舌ブラシ	
オーラルメイト	10
フレッシュメイトソフト	10
タングメイト	10
予防剤	
E-ブレスジェル	10
E-ブレススプレー	10
義歯の洗浄	
染色剤	
デンチャーブラックチェッカー	11
保管	
入れ歯ケース	11
口腔衛生	
開口補助・保持具	
バイトロックW	11
バイトロックS	11
バイトロックⅡ	11
デンタルフロス	
フロスエイドプロ	11
デントフロスプロ	11
開口補助・保持具	
バイトロックシリーズ	12
ドライマウス(口腔保湿剤)	
ウエットエイド	13
デンチャージェル	13
デンチャーウエット	13
訪問診療	
亀水化学の訪問診療	14

義歯材料 リライン材
動的機能リライン材（軟質→硬質）

PAT.

ペリフィット



粉液比を変えることで、床の辺縁延長・封鎖ができる動的リライン材。「DIL」同様、はじめはティッシュコンディショナーのように軟らかく機能印象を採りながら翌日から徐々に硬化が始まります。軟質期間が短いので耐久性が向上しています。

セット内容 粉 70g、液 50mL
ニュートップコート 30mL
専用シリンジ 2本
色調単品 ライブピンク・ピンク
粉 70g
液 50mL
専用シリンジ 2本

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 認証番号 223AFBZX00107000

義歯材料 リライン材
動的機能リライン材（軟質→硬質）

PAT.

DIL（ディル）



はじめはティッシュコンディショナーとしての機能があり、装着後、約1週間経過すると自発的に硬化が始まります。そして機能時の印象のままリライン材になるので、痛みが少なく義歯に慣れやすくなります。「ダイナミックライナー」の後継品で、操作時間の短縮化と操作性の改善をしています。

セット内容 粉 50g、液 45mL
ニュートップコート 30mL
色調単品 ライブピンク・ピンク
粉 50g
液 45mL

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 認証番号 219AFBZX00118000

義歯材料 リライン材
動的機能リライン材（軟質→硬質） 光重合型

PAT.

Fdrペリ（エフディーアールペリ）



はじめはティッシュコンディショナーのように軟らかく、動的機能印象の採得後、光重合することによって硬質のリライン材に変化します。「FD r」の後継品で、操作時間の短縮化と操作性の改善をしています。また、粉液比を変えることで、床の辺縁延長・封鎖ができます。

セット内容 粉 80g、液 60mL
ニュートップコート 30mL
専用シリンジ 2本
色調単品 ピンク
粉 80g
液 60mL
専用シリンジ 2本

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 承認番号 20900B Z Z00135000

義歯材料 リライン材
動的機能リライン材（軟質→硬質） 光重合型

PAT.

FD r（エフディーアール）



はじめはティッシュコンディショナーのように軟らかく、動的機能印象の採得後、光重合することによって硬質のリライン材に変化します。但し、「Fdrペリ」よりゲル化までの時間が長くなっており、辺縁延長機能はありません。

セット内容 粉 80g、液 60mL
ニュートップコート 30mL
色調単品 ピンク
粉 80g
液 60mL

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 承認番号 20500B Z Z00791000

義歯材料 リライン材
動的機能リライン材（軟質→硬質）

PAT.

ダイナミックライナー



はじめはティッシュコンディショナーとしての機能があり、装着後、約1～2週間経過すると自動的に硬化が始まります。硬化完了までは軟質レジン専用義歯洗浄剤「クリーンソフト」（亀水化学）を使用してください。機能時の印象のままリライン材になるので、痛みが少なく義歯に慣れやすくなります。

セット内容 粉 60g、液 45mL
ニュートップコート 30mL
色 調 ピンク
単 品 粉 60g
液 45mL

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 承認番号 20600B Z Z00788000

義歯材料 ティッシュコンディショナー
ティッシュコンディショナー

デンチャーソフトⅡ



適度なやわらかさのため機能印象が採得しやすくなっています。また、特殊配合による優れた耐久性のため短期裏装材としても使用できます。また、付属の表面滑沢材「ニュートップコート」を使用することでさらに耐久性がアップします。

セット内容 粉 100g、液 80mL
ニュートップコート 6mL
色 調 ピンク・ホワイト
単 品 粉 100g
液 80mL

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床用短期弾性裏装材
- 承認番号 20500B Z Z00089000

義歯材料 リライン材
硬質リライン材

マイルド



ウォッシュアップ用として開発された低刺激のリライン材です。フローが良く、シャープに硬化するため口蓋部が厚くなりません。また、発熱が少なく、適合の良いリライン面が得られます。

セット内容 粉 80g、液 50mL
ニュートップコート 6mL
色 調 ピンク
単 品 粉 80g
液 50mL

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 承認番号 20100B Z Z02060000

義歯材料 リライン材
硬質リライン材

デンチャーライナー



徐々に硬化するため、パーシャルデンチャーなどアンダーカットの多い症例でも安心して取り外せます。また、付属の「硬化促進剤」を併用することにより、床と同様の硬さが得られます。そのため仕上げ研磨時に、床とリライン材との境界に段差がつきにくくなりました。

セット内容 粉 100g、液 100mL
硬化促進剤 36g
色 調 ピンク

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 承認番号 15900B Z Z01269000

義歯材料 リライン材
アクリル系軟質リライン材

FDソフト



半年から1年近くの耐久性があります。アクリル系の特長として、①直接口腔内で追加修正できる、②適合試験材が使用できる、③床からの剥離が少ない、④粘弾性でシリコーン系よりも咀嚼効率が良い、などの多くの利点があります。但し、軟質レジン専用義歯洗浄剤「クリーンソフト」(亀水化学)での洗浄が必要です。

セット内容 粉 110g、液 100mL
ニュートップコート 30mL
色調 ピンク
単品 粉 110g
液 100mL

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 承認番号 21300B Z Z00125000

義歯材料 リライン材
アクリル系軟質リライン材 光重合型

PAT.

コンフォートナー



アクリル系の各特長の他に、表面滑沢材が光重合で強固な重合膜となるため、アクリル系の欠点であった軟質レジン専用義歯洗浄剤「クリーンソフト」を必要としません。市販の「酵素入りポリデンT」(アース製薬)が使用できるようになり、耐久性が大幅に向上いたします。

セット内容 粉 60g、液 50mL
コートライナーキット
色調 ピンク
単品 粉 60g
液 50mL
コートライナー

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 承認番号 21600BZZ00150000

義歯材料 リライン材
アクリル系軟質リライン材

ティッシュテNDER



シリコーン系にはないアクリル系軟質リライン材の各特長を有し、ソフテンよりも軟質です。経済的価格を実現した軟質リライン材です。面荒れ防止のため、軟質レジン専用義歯洗浄剤「クリーンソフト」(亀水化学)での洗浄が必要です。

セット内容 粉 100g、液 100mL
ニュートップコート 30mL
色調 ピンク
単品 粉 100g
液 100mL

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 承認番号 20400B Z Z00766000

義歯材料 リライン材
アクリル系軟質リライン材

ソフテン



販売中止

日本で最初に開発されたアクリル系軟質リライン材です。面荒れ防止のため、軟質レジン専用義歯洗浄剤「クリーンソフト」(亀水化学)での洗浄が必要です。

セット内容 粉 100g、液 100mL
ニュートップコート 6mL
色調 ピンク

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 承認番号 16300B Z Z00289000

義歯材料 表面滑沢材
表面滑沢材 兼 接着材 光重合型

PAT.

コートライナー



光重合型の「コンフォートナー」に用いられる軟質リライン材専用の表面滑沢材です。光重合で強固な膜をつくりますので、耐久性が大幅に向上します。

セット内容
コートライナー 20mL
筆洗うすめ液 10mL
オキシバリアー 25mL
オキシバリアー用ブラシ 15本
オキシバリアー用スポイト
筆洗用スポイト、小分け用カップ

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材
- 承認番号 21600B Z Z00149000

義歯材料 表面滑沢材
表面滑沢材 兼 接着材

ニュートップコート



アクリル系軟質リライン材専用で、塗るだけで面が滑沢になり、耐久性が向上します。また、床との接着材としても用いられます。

セット内容
80mL
取替用ブラシ 40本
筆洗うすめ液、カップ 40個
30mL
取替用ブラシ 12本
筆洗うすめ液
6mL
取替用ブラシ 12本
単品 取替用ブラシ 50本
筆洗うすめ液 10mL

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材
- 承認番号 21000B Z Z00591000

義歯材料 治療用義歯
複製義歯・義歯トレー用レジン

レプリカ



レジンの収縮を抑えて適合精度を上げ、且つ滑沢な面が得られる複製義歯専用の特殊レジンです。専用のフラスコとアルギン酸印象材で簡単に複製義歯が作れます。

セット内容
歯冠用粉 60g、床用粉 200g
液 200mL、専用フラスコ
表面滑沢材 30mL
色調 歯冠用（アイボリー）
床用（ライブピンク）
単品 専用フラスコ
歯冠用粉 60g
床用粉 200g
液 200mL
表面滑沢材

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 承認番号 20300B Z Z00403000

義歯材料 トレー用
仮床・トレー用レジン

フィットベース



特殊成分配合により、重合収縮が少ない仮床専用の即時重合レジン。「フィットベース」で制作した仮床は模型への適合が良いため、本義歯の吸着状態の予後判定ができます。

色調 ピンク
単品 粉 250g
液 200mL

- 医療機器の分類 一般医療機器
- 一般的名称 歯科印象トレー用レジン
- 届出番号 27B2X00004000001

義歯材料 咬合面
咬合面再構築用レジン 光重合型

PAT.

バイトアップ



常温重合（一次硬化）後、光照射でさらに光重合（二次硬化）させるため、咬合面がレジン歯並の硬さになり、レジン歯の咬合面再形成や義歯の咬合高径の修正に使用します。咬合面への均一な盛り上げが、専用シリンジで簡単にできます。

セット内容 粉 80g、液 60mL
表面滑沢材 10mL
専用シリンジ 2本
色調 アイボリー
単品 粉 80g
液 60mL
表面滑沢材
専用シリンジ 2本
紙練板 60枚綴

●医療機器の分類 管理医療機器
●一般的名称 義歯床補修用レジン
●承認番号 21000B Z Z00544000

歯冠材料 仮封材
仮封用レジン

ポリシール



仮封用レジンで、以下の特長があります。

- ①硬化が速く、操作完了も早い。
- ②手指へのべたつきが少ない。
- ③歯面封鎖性が良く、外しやすい。
- ④マッチしやすい歯冠色。

セット内容 粉 50g、液 50mL
色調 アイボリー
単品 粉 100g
液 100mL
専用筆

●医療機器の分類 管理医療機器
●一般的名称 歯科用高分子系仮封材料
●承認番号 20400B Z Z00024000

歯冠材料 即重レジン
テンポラリークラウン・ブリッジ用レジン

テックレジン



速硬性で、且つ、削りやすい適度な硬さのため、スピーディな診療が行えます。熱収縮が少ないので、適合精度が良いです。

セット内容 粉 100g、液 100mL
色調 アイボリー
単品 粉 100g
徳用粉 250g
液 100mL
徳用液 300mL

●医療機器の分類 管理医療機器
●一般的名称 アクリル系歯冠用レジン
●承認番号 20600B Z Z01192000

歯冠材料 鋳造可能
鋳造可能即重レジン

レジナップ



鋳造可能なテック用レジンのため、以下のことが可能となりました。①メタルボンド冠など、脱落ポストクラウンの歯冠部に適合させたポストの再製。②金属床のクラスプに適合させた鉤歯鋳造冠の再製。

セット内容 粉 100g、液 100mL
色調 アイボリー
単品 粉 100g
液 100mL

●医療機器の分類 管理医療機器
●一般的名称 アクリル系歯冠用レジン
●承認番号 16200B Z Z01506000

即重レジン 汎用
汎用レジン

スナップ



歯冠色、歯齦色の2種類からなる即時重合レジンです。テンポラリークラウン、義歯の修理などにご使用いただけます。

色調単品	ピンク・アイボリー
	粉 100g
	粉 250g
	液 80g
	液 300g

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 アクリル系歯冠用レジン
- 承認番号 16200B Z Z01505000

即重レジン 汎用
汎用レジン

SKIP (スキップ)



少ない発熱で素早い硬化の即時重合レジンです。環境温度の影響を受けにくく、冬期でも短時間で硬化します。

セット内容	粉 100g、液 100mL
色調単品	ピンク・アイボリー
	粉 100g
	液 100mL

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 義歯床補修用レジン
- 承認番号 20200B Z Z01550000

即重レジン 咬合採得
咬合採得用レジン

バイトレジン



低刺激、低発熱で硬化がスピーディな咬合採得専用のレジンです。シリンジで咬合面に簡単に盛り上げられ、アンダーカット部にも使用できます。遊離端義歯の仮床の代用として、レジンの一塊で咬合採得ができます。

セット内容	粉 200g、液 100mL
	専用シリンジ 2本
色調単品	クリアー
	粉 200g
	液 100mL
	専用シリンジ 2本
	紙練板 100枚綴

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 歯科用レジン系印象材
- 承認番号 20500B Z Z00088000

即重レジン バイトプレート
バイトプレート用レジン

マルチガード



アンダーカットがあっても適度な軟性があるため、石膏模型がなくとも、直接、口腔内でバイトプレートを作製することができます。

セット内容	粉 120g、液 60mL
	ニュートップコート 6mL
	専用シリンジ 2本
色調	アイボリー

- 医療機器の分類 管理医療機器
- 一般的名称 歯科用長期的使用咬合スプリント向け材料
- 承認番号 20600B Z Z00530000

診療用器具 集塵BOX
簡易集塵BOX

PAT.

ダストシューター



粉塵をポリ袋に集めてそのまま廃棄できます。切削時の飛散防止。粉塵の吸い込みや白衣への付着防止。

セット内容 本体、取替用ウレタン板 2枚
ポリ袋 (45号) 20枚
専用輪ゴム 1個
単品 取替用ウレタン板 2枚



[寸法]
折りたたみ時: W485×D230×H10mm
組立時: W230×D205×H140mm

安全

衛生的

在宅診療

粉塵は落として集めて、すぐ廃棄

ダストシューター

PAT.P

より安全で衛生的な在宅診療に「簡易集塵BOX」

- 粉塵をビニール袋*に集めて、そのまま廃棄
*45号*外形寸450mmマチ含む
- 切削時の飛散防止
- 粉塵の吸い込みや白衣への付着防止
- 開口部が大きく拭拭しやすい
- ウレタン部分は交換可能



電水化学工業株式会社

診療用器具 カンジダ培地
カンジダ簡易検出培地

カンジダディテクター

訪問診療の現場で活躍
室温培養可能 (設備投資不要)
保険請求可能

CFU/mL 10⁷ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² 10¹

C.albicansの菌数及び色変化と判定

37°C 恒温槽
48時間

(+) (+) (+) (+) (+) (±) (-) (-)

本培地はサブロー培地を基本とし、採取された検体に混在する細菌類が発育せず、カンジダ菌(真菌)のみを選択的に検出するように発育抑制剤が添加された培地で、且つ、特殊指示薬を含有しているため、コロニー数による判定に限らず、短時間で色変化によりカンジダ菌を検出判定することができます。

セット内容 寒天培地 10本
滅菌綿棒 10本
ネームラベル 10枚
カンジダ菌検査結果シート 10枚
使用説明書 (判定見本)

カンジダ簡易検出培地



操作が簡単で室温培養ができます
しかも保険請求可能

C.albicansの菌数及び色変化(赤→黄)判定
(培地のpHの変化に対応して赤色→黄色に変化します)

10⁷ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² 10¹ CFU/mL

(+)陽性 (±)弱陽性 (-)陰性

37°C 恒温槽

48時間

37°C恒温槽で培養することで、2日間で判定することができます。

室温培養の場合
夏季/3~5日間
冬季/5~7日間

- 1 抗真菌薬処方の前に検査を行いましょう
 - 2 訪問診療の現場で活躍
 - 3 設備投資が不要
 - 4 患者様への説明が簡単
- 日常臨床の
口腔ケアの評価方法

カンジダディテクター

入っています

要冷蔵

(内容)
寒天培地.....10本
滅菌綿棒.....10本
ネームラベル.....10枚
カンジダ菌検査結果シート.....10枚
使用説明書 (判定見本)

電水化学工業株式会社
KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD.

義歯の洗浄 着色用
着色除去用義歯洗浄剤

デントクリーン

サンプルあり

超音波洗浄専用



超音波洗浄専用で、5～10分程度で頑固な着色が落ちます。軟質リライン材にも使用でき、義歯臭がとれ除菌できます。2倍に薄めて使用します。

注意 有毒ガスが発生して危険ですので、酸性の洗浄剤（ストーンメルト）と混合しないでください。
容量 4.0L
1.2L

デントクリーン洗浄前



洗浄前
多数の菌コロニーあり



デントクリーン洗浄後



デントクリーン2倍希釈7分間
きれいに除菌

義歯洗浄剤 歯石用
歯石除去用義歯洗浄剤

ストーンメルトジェル

サンプルあり

ブラシ用
(超音波洗浄不要)



義歯や義歯用ブラシに本剤を塗布し、1～2分磨くことで歯石を除去します。本剤はクラスプやレジン義歯床を侵さず、表面のヌメリをとり、除菌になります。歯石の

沈着が多いケースには、何度もこれを繰り返して徐々に歯石を取り除きます。


容量 200mL



本剤をつけたブラシで義歯を清掃します。



(使用前)

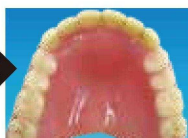

(使用后)

義歯の洗浄 歯石用
歯石除去用義歯洗浄剤

ストーンメルト

サンプルあり


超音波洗浄専用



超音波洗浄専用で、5～10分程度の洗浄で頑固な歯石を除去します。超音波洗浄後は、柔らかくなった歯石を硬めの歯ブラシでこすり落としてください。原液を使用します。

注意 有毒ガスが発生して危険ですので、塩素系の洗浄剤（デントクリーン）と混合しないでください。
容量 1.8L

使用方法

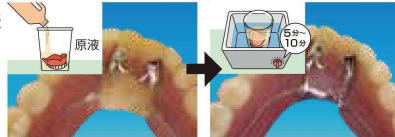

(使用前)

(使用后)

義歯の洗浄 ホームケア
軟質レジン専用義歯洗浄剤

クリーンソフト


サンプルあり




軟質レジン専用義歯洗浄剤で、一般の義歯洗浄剤では侵されて面が荒れやすいティッシュコンや軟質リライン材専用開発されました。他社酵素系の数十倍の洗浄効果があり、軟質レジンに付着したカンジダ菌などのデンチャープラークや嫌な臭いを強力に除去し、レジンの劣化を予防します。

注意 作用が穏やかなので入れ歯やクラスプをいためませんが、反面漂白作用がないため、茶シブやタバコのヤニなどは除去出来ません。


オーラルメイト

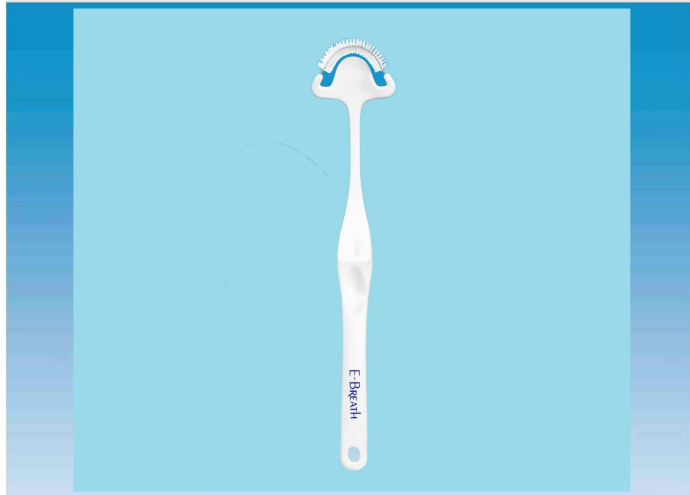

極細ブラシが効果的に舌ヒダ内を色調白
清掃します。ヘッド部分が長い
ため、舌苔の溜まりやすい舌の奥ま
で届きやすくなっています。

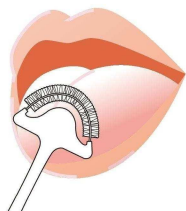

フレッシュメイトソフト

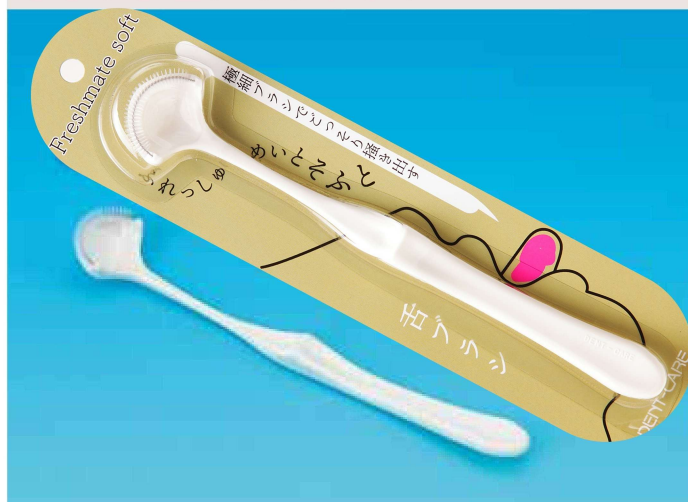

掻き取った舌苔をカバー内面に蓄色調白
えて漏らさず、誤嚥を防ぎます。
長いネックとワイヤーの弾性、及
びフィラメントの3つの弾性で舌
を傷めません

タングメイト





舌乳頭間に入りやすい極細ナイロン色調白、ピンク
フィラメントのため、口臭の原因
となっている食物残渣や剥離上
皮などを効率よく掻き出します。
また、ヘッド部分が小さく薄いた
め舌の奥まで届きやすく、嘔吐反
射を防ぎます。携帯に便利なブラ
シケース付もあります。

E-ブレス



口臭の原因となる揮発性硫黄化合
物を分解する成分を配合していま
す。携帯用のスプレータイプと舌
ブラシ専用のジェルがあります。

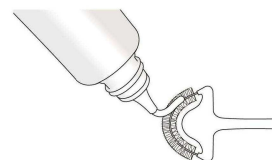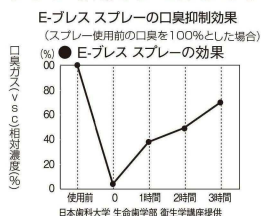

義歯の洗浄 染色剤 PAT.P
デンチャーブラック染色剤 (泡タイプ)

デンチャーブラックチェッカー

サンプルあり



デンチャーブラックの取り残しなど、患者様への義歯洗浄方法の指導に使用。短時間で広範囲に低コストで染色できます。①デンチャーブラックや破折の発見が容易。②きめの細かい泡で義歯全体に広げやすい。③泡状で垂れにくいので、周囲を汚しにくい。④義歯の洗浄効果もあります。



泡盛り上げ 染色後 拡大
泡だし口に義歯を近づけ、1~2プッシュして、ゴム手袋をした手指、またはスポンジブラシで義歯全体に塗り広げます。10秒ほど経ってから、軽く水で洗い流してください。デンチャーブラックの付着箇所や、義歯のクラックが判ります。

義歯の洗浄 保管
デンチャーボックス

入れ歯・マウスピースケース

日本製
耐熱温度：120℃
耐冷温度：-20℃



水漏れしない密封パックで、義歯の乾燥を予防します。また、容器の底の中央部に義歯洗浄剤を置くと、洗浄効果が得られます。

口腔衛生 開口補助・保持具 PAT.
口腔ケア用 開口補助・保持具

バイトロック シリーズ

デモ品あり



バイトロックシリーズは開口度にあわせて3種類あります。

特長は

- ①シリコン製で口腔内を傷つけない
- ②オートクレーブ滅菌可能です。
- ③ペンライトを入れて操作が可能です。

バイトロックW (ブルー)
バイトロックS (パープル)
バイトロックII かため (ブルー)
やわらかめ (オレンジ)

口腔衛生 デンタルフロス PAT.
デンタルフロス

フロスエイドプロ&デントフロスプロ



フロスエイドプロは前歯・臼歯部両用のフロス付ホルダーです。奥まで届くコンパクトサイズで、フロスの使用量が少なく経済的。テフロン系フロス (材質:PTFE) は、狭い歯間部でも切れずに清掃できます。デントフロスプロはノンワックスですが、滑りが良くて歯肉に優しく、ミントの香りがお口を爽やかにします。

(口腔ケア用 開口補助具) バイトロックシリーズ

開口障害のある患者さんへ！ 口腔ケアを行う際に、開口を誘導しながら保持することができます。



症例
特に嚙む力が強い方、大きく開口維持したい。

特長
回し入れることが不安な術者に。
スムーズにスライド、ワイドに開口度UP。

サイズ
全長：105mm、穴部：直径 20mm、
突起部：長さ 44mm(先端部 7.5mm)



症例
特に開口が低い方、子供、口が小さめの女性。

特長
見た目はスリムだがしっかり保持。

サイズ
全長：105mm、穴部：直径 20mm、
突起部：長さ 43mm(先端部 7mm)



症例
やわらかめ 軽度の歯周病の方、
動揺歯がない方。
かため 歯茎が健康で咬合力
が強く歯がたくさん
残っている方。

特長
かための硬さに不安
を感じる方。

特長
弾力性があり
歯にやさしい。
製品が変形すること
なく開口度調整しや
すい。

サイズ
全長：108mm、穴部：直径 21mm、
突起部：長さ 42mm(先端部 10mm)



このように方にオススメ

乾燥による入れ歯のトラブル
入れ歯安定剤使用によるトラブル
入れ歯の脱離

要介護者の口腔ケア
ドライマウス患者

入れ歯が乾いてしゃべりにくい
入れ歯に食べ物がつきやすい
口唇の乾き

Denture Gel デンチャージェル



サンプルあり

ソフトな装着で
ピタッとフィット

保湿成分： **柿タンニン**

水溶性 吸着力UP ↑↑



使用方法



口腔内
チューブから約1cmを指先にとり、お口に含み、舌先をお口の中で動かして、ジェルがお口全体に充分ゆきわたるようにする。



入れ歯
デンチャージェルを、入れ歯粘膜面に塗布することで乾燥による傷みや脱離を軽減することができる。



サンプルあり

甘みをおさえ
サラサラ使用感

保湿成分： **ヒアルロン酸Na**

水溶性 水分が高浸透
うるおい



使用方法 (泡タイプ)



①泡状の本剤をスポンジブラシ等につけ、汚れに塗って軟化させてから口腔ケアしてください。
②甘みをおさえサラサラとした使用感です。

Denture Wet デンチャーウェット



サンプルあり

油性のため
保湿効果が長く続く

保湿成分： **スクワランオイル**

油性 オイル成分により
ツルツル



使用方法



入れ歯表面に本剤を塗布して使用します。

亀水化学の訪問診療

口腔ケア



【舌清掃】

オーラルメイト-E
フレッシュメイトソフト

【口腔内検査】

カンジダディテクター

【開口保持】

バイトロック
シリーズ

【ドライマウス】

ウエットエイド



義歯ケア



【義歯洗浄】

デントクリーン
ストーンメルト
ストーンメルトジェル
クリーンソフト
デンチャーブラークチェッカー

【口腔保湿剤】

デンチャージェル
デンチャーウエット



義歯修理



【適合】

ペリフィット
D I L

【修理】

スナップ
SK I P
バイトアップ

【研磨】

ダストシューター



カンジダディテクター・・・P8
本培地はサブロー培地を基本とし、コロニー数による判定と色変化により容易にカンジダ菌を検出、判定します。室温培養可能です。

オーラルメイト・・・P10
ヘッド部分が長く、舌苔の溜まりやすい舌の奥まで届きやすい。

フレッシュメイトソフト・・・P10
掻き取った舌苔をカバー内面に蓄えて漏らさず、誤嚥を防ぎます。

ウエットエイド・・・P13
ドライマウスや除去が難しい乾燥痰や剥離上皮膜に垂れない泡状にして急速軟化除去します。

バイトロックシリーズ・・・P12
開口障害のある患者様へ口腔ケアを行う際に、開口を誘導しながら保持します。

デントクリーン・・・P9
超音波洗浄専用
5～10分程度で頑固な着色が落ちます。

ストーンメルト・・・P9
超音波洗浄専用
5～10分程度の洗浄で頑固な歯石を除去します。

ストーンメルトジェル・・・P9
超音波洗浄不要
ブラシに塗布し1～2分磨くことで歯石を除去します。

クリーンソフト・・・P9
アクリル系軟質リライン材専用の義歯洗浄剤。

デンチャーブラークチェッカー・・・P11
デンチャーブラークの取り残しなど、患者様への義歯洗浄方法の指導に使用。

デンチャーウエット・・・P13
スクワランオイルの働きで、入れ歯の表面を滑沢にし、潤いを与えます。

デンチャージェル・・・P13
従来品よりも粘性があるため、義歯装着者にも使用できます。

ペリフィット・・・P2
粉液比を変えることで、床の辺縁延長・封鎖ができる動的リライン材です。

D I L・・・P2
はじめティッシュコンとしての機能があり、装着後、約1週間経過すると自発的に硬化が始まります。

バイトアップ・・・P6
一次硬化(常温重合)後、さらに光重合すると、硬度が高く長期にわたり安定した咬合が得られます。

スナップ・・・P7
テンポラリークラウン、義歯の修理などに使用。

SK I P・・・P7
少ない発熱で素早い硬化の即時重合レジン。

ダストシューター・・・P8
粉塵をポリ袋に集めてそのまま廃棄します。

(お問合せ)フリーダイヤル**0120-267-720**

亀水化学工業株式会社

大阪府寝屋川市豊里町17-16 〒572-0071
TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299
<http://kamemizu.co.jp/>
E-mail:info@kamemizu.co.jp

株式会社 デントケア

TEL / 072-828-8590
<http://dent-care.net/>
E-mail:info@dent-care.net

※価格は全て税別表示です。価格は予告なく変更することがあります。

2025.2

KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD.