

## CLEAN SOFT EX

### 安心

粒タイプで  
誤飲リスク  
低減

### 簡単

傾けるだけで  
一回分が出る  
キャップ付き

### 便利

持ち運びやすい  
コンパクト容器

### お得

約110回分の  
大容量で経済的

### すっきり

洗浄後爽快！  
清涼成分配合

歯科医師推奨



### 口腔内装具洗浄剤 クリーンソフトEX

- 内容量 70g
- 患者様価格 1個 1,650円(税込)

製造・販売元 亀水化学工業株式会社  
〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町17-16  
☎ 0120-267-720 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土日祭日は除く)

医療機関専売品

毎日のお手入れを、もっと簡単、もっと安心に。

# 口腔内装具洗浄剤 クリーンソフトEX



入れ歯



部分  
入れ歯



矯正用  
リテーナー



マウス  
ピース



★軟質材料の義歯にも使用可能

## 汚れもニオイもしっかり落とす

KAMEMIZU



## 酵素の優れた洗浄力

ニオイやヌメリの元となるカビの膜<sup>\*</sup>を特殊酵素が徹底分解。

口腔内装具を清潔に保ちます。

※カンジダバイオフィルム

コーヒーや茶渋などの

しつこい着色汚れもスッキリ除去◎

## 口腔内装具にやさしい成分

漂白剤不使用で材質へのダメージを抑え長期間の使用でも安心。

矯正装具・義歯床・金属床に使用可能

ワイヤー・クラスプ・バー等が劣化しにくい

# クリーンソフトEXで かんたん解決！



溶かす ▶▶▶ 漬ける ▶▶▶ 仕上げ洗い

## Q&A

Q. 従来品のクリーンソフトと違いはありますか？

A. 以下の違いがあります。

- ・着色汚れの除去性能が向上
- ・清涼感をもたらす成分を新たに配合
- ・誤飲防止のために水溶時の色味が濃い
- ・浸漬時間2時間→1時間に短縮
- ・使用回数の増加

(従来品) クリーンソフト 約90回分

クリーンソフト EX 約110回分

Q. 使用する際の水量は？

A. 約150mLの水またはお湯(約15~40℃)に浸漬してください。

水温が高いほど、洗浄成分の働きが促進されより効果的にご使用いただけます。

