

歯科印象トレー用レジン  
(一般医療機器)  
届出番号:27B2X00004000002

# 進化したレプリカシリーズ 歯科印象トレー用レジン レプリカトレー

## REPLICA TRAY



レジン臭軽減  
(当社比)



色調: ピンク アイボリー クリア  
※クリアのみ専用液別売り

あつたらいいな

個人トレーの簡単な作り方

POINT

旧総義歯を活用した作製方法

YouTube  
ご使用方法動画



亀水化学工業株式会社  
〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町17-16  
TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299

お問い合わせ ☎ 0120-267-720  
<https://kamemizu.co.jp>  
E-mail: info@kamemizu.co.jp

# 旧総義歯形態情報


を活用した個人トレー

研磨面の形態が再現できます



床の形態

床縁の長さ

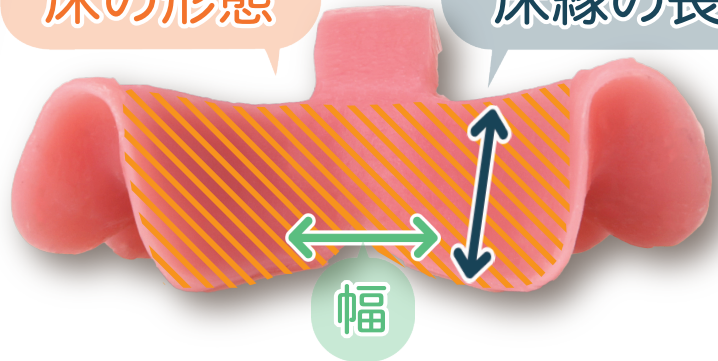

石膏模型の作製不要!!  
患者さんから印象を採る必要がありません

## 個人トレーの **かんたん** 簡単な作製方法


STEP  
01



### 旧義歯の印象・埋没

アルギン酸塩印象材練和後、旧義歯に印象材をあらかじめ床内面全体に手指でこすりつけるように塗布します。その後、粘膜面を下にして埋没します。印象材硬化後、余剰な印象材を取り除き、旧義歯を取り出します。

STEP  
02

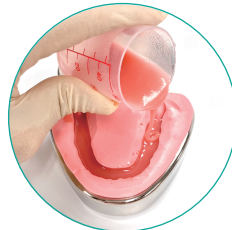

### レジン混和・流し込み

計量したレプリカトレー粉と液を混和後、流し込んでください。  
(硬化時間：混和開始より約10分)

✓ 流動性が良く、型の細部まで容易に流し込めます。

※クリアのみ専用液が別売りです。



STEP  
03



### 持ち手作製・取付

流し込んだレジンの流動性が鈍くなった後に、余ったもち状レジンで個人トレーの持ち手を作製し、流し込んだレジンと接続します。

STEP  
04



### 試適と溢出孔の付与

形態修正後、トレーを試適し強圧部を調整します。余剰な印象材が引き起こすトレーの浮き上がりを防止するために完成品に溢出孔を設けます。

高い  
精度

